



# MANTAS TÉRMICAS PARA ANIMAIS

MANTAS DESCARTÁVEIS COCOON

Cuidar com Excelência



# MANTAS TÉRMICAS

## MANTAS PARA AQUECIMENTO DE ANIMAIS

### MANTAS TÉRMICAS PARA AQUECIMENTO DE ANIMAIS

AS MANTAS COCOON SÃO DE TECIDO NÃO TECIDO MACIO, CONFORTÁVEL E LEVE. TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NAS MANTAS SÃO ISENTAS DE LÁTEX. AS PERFURAÇÕES MICROSCÓPICAS EXCLUSIVAS FORNECEM DISTRIBUIÇÃO DE AR UNIFORME SEM O RISCO DE RESÍDUOS. OS ATILHOS DA ENTRADA UNIVERSAL GARANTEM QUE A MANGA PERMANEÇA FIRMEMENTE COLOCADA NA MANTA. OS LAÇOS E O TECIDO RESISTENTE PERMITEM O USO DA MESMA MANTA NO PACIENTE DESDE O PRÉ-AQUECIMENTO, PASSANDO PELA CIRURGIA ATÉ A RECUPERAÇÃO.

### INDICAÇÕES DE USO

UMA ALMOFADA PARA INCONTINÊNCIA PODE SER COLOCADA SOB O ANIMAL NA ÁREA CENTRAL.

COLOQUE A MANTA POR BAIXO OU POR CIMA, DEPENDENDO DO MODELO DA MANTA.

O LADO BRANCO DA MANTA DEVERÁ FICAR VOLTADO PARA O ANIMAL.

INSIRA A MANGA DO AQUECEDOR EM QUALQUER PORTA DE ENTRADA DA MANTA.

NÃO OBSTRUA O TUBO DE INSUFLAÇÃO NA ENTRADA DA MANTA OU AO FECHAR A PORTA DA GAIOLA (DEPENDENDO DO MODELO DA MANTA).

MONITORIZA A TEMPERATURA DO ANIMAL COM FREQUÊNCIA. DEVERÁ SER SEGUIDO O PROTOCOLO DO HOSPITAL/CLÍNICA.

SUBSTITUA A MANTA SE ESTIVER MOLHADA OU SUJA.

POSICIONE O ANIMAL DORSAL OU LATERALMENTE.

MODELO: VET001

NOME: COCOON VET MANTA ACESSO TOTAL, MÉDIO A GRANDE

DIMENSÕES: 126CM LARGURA X 79CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 3

INDICAÇÕES DE USO: ANESTESIA E CIRURGIA

DESCRIÇÃO: MANTA "UNDER BODY" PARA PORTE MÉDIO/GRANDE

UNIDADES/CX: 10

MODELO: VET002

NOME: COCOON VET MANTA ACESSO TOTAL, PEQUENO


DIMENSÕES: 86CM LARGURA X 79CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 3

INDICAÇÕES DE USO: ANESTESIA E CIRURGIA

DESCRIÇÃO: MESMO DESIGN DA VET001 COM MENORES DIMENSÕES

UNIDADES/CX: 10

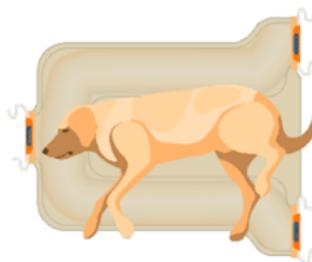



# MANTAS TÉRMICAS

## MANTAS PARA AQUECIMENTO DE ANIMAIS

MODELO: VET003

NOME: COCOON VET MANTA COLOCAÇÃO POSTERIOR, MÉDIO A GRANDE

DIMENSÕES: 123CM LARGURA X 83CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 2

INDICAÇÕES DE USO: ANIMAL ENJAULADO, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO

DESCRIÇÃO: MANTA "OVER BODY" PARA PORTE MÉDIO/GRANDE

UNIDADES/CX: 10



MODELO: VET004

NOME: COCOON VET COLOCAÇÃO POSTERIOR, PEQUENO

DIMENSÕES: 66CM LARGURA X 86CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 2

INDICAÇÕES DE USO: ANIMAL ENJAULADO, ANESTESIA, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO

DESCRIÇÃO: MESMO DESIGN DA VET003 COM MENORES DIMENSÕES

UNIDADES/CX: 10



MODELO: VET005

NOME: COCOON VET COLOCAÇÃO POSTERIOR, GRANDE (L)


DIMENSÕES: 100CM LARGURA X 120CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 1

INDICAÇÕES DE USO: ANESTESIA, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO

DESCRIÇÃO: MANTA "OVER BODY" PARA PORTE GRANDE

UNIDADES/CX: 30

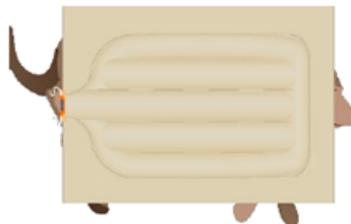

MODELO: VET006

NOME: COCOON VET COLOCAÇÃO POSTERIOR, EXTRA GRANDE (XL)

DIMENSÕES: 100CM LARGURA X 195CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 1

INDICAÇÕES DE USO: ANESTESIA, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO

DESCRIÇÃO: MANTA "OVER BODY" PARA PORTE EXTRA GRANDE

UNIDADES/CX: 30



MODELO: VET007

NOME: COCOON VET TUBO MANTA, MÉDIO A GRANDE

DIMENSÕES: 14CM LARGURA X 180CM COMPRIMENTO

ENTRADAS: 1

INDICAÇÕES DE USO: ANIMAL ENJAULADO, ANESTESIA, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO

DESCRIÇÃO: MANTA TUBULAR PARA MÉDIO A GRANDE PORTE

UNIDADES/CX: 30





# MANTAS TÉRMICAS

## MANTAS PARA AQUECIMENTO DE ANIMAIS

- MODELO: VET008
- NOME: COCOON VET TUBO MANTA, PEQUENO A MÉDIO
- DIMENSÕES: 14CM LARGURA X 99CM COMPRIMENTO
- ENTRADAS: 1
- INDICAÇÕES DE USO: ANIMAL ENJAULADO, ANESTESIA, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO
- DESCRIÇÃO: MESMO DESIGN DA VET007 COM MENORES DIMENSÕES
- UNIDADES/CX: 30




### INOVAÇÃO ÚNICA COCOON

#### BENEFÍCIOS:

- AQUECE O ANIMAL DIRETAMENTE NA PORTA DA JAULA/CANIL.
- DESIGN VERSÁTIL PARA PERMITIR QUE A ENTRADA SE AJUSTE A QUALQUER TAMANHO DE JAULA/CANIL.
- ACESSO CONTÍNUO SEM INTERRUÇÃO DA TERAPIA DE AQUECIMENTO.

- MODELO: VET009
- NOME: COCOON VET MANTA COLOCAÇÃO POSTERIOR, GRANDE
- DIMENSÕES: 100CM LARGURA X 120CM COMPRIMENTO
- ENTRADAS: 1
- INDICAÇÕES DE USO: ANESTESIA, CUIDADOS CRÍTICOS, RECOBRO
- DESCRIÇÃO: IDEAL PARA TERAPIA PRÉ-CIRÚRGICA OU RECOBRO PÓS-CIRÚRGICO COM UMA ENTRADA EXTRA GRANDE PARA FÁCIL ACESSO AO ANIMAL NO INTERIOR DA JAULA/CANIL.
- UNIDADES/CX: 10

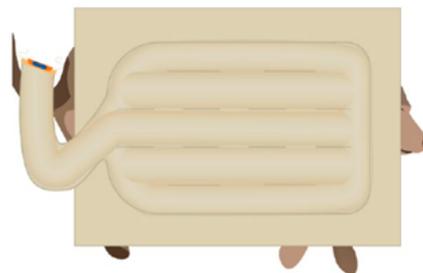

#### FORNECEDOR:

 **CARE  
ESSENTIALS**

CARE ESSENTIALS PTY, LTD  
103 MORNINGTON STREET, NORTH GEELONG, VIC3215  
PHONE: +61 3 5277 1455 | EMAIL: QUERIES@CAREESSENTIALS.COM.AU

CE 0805  
EC REP

