



PMH-03P-02F REV.01

CINTA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DE SONDA

SU-216

FL-057 REV.00 | Data: 16/08/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



CINTA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DE SONDA

SU-216

O PRODUTO É COMPOSTO POR UMA CINTA ELÁSTICA COM SILICONE PARA FIXAR AO MÚSCULO E EVITAR A SUA DESLOCAÇÃO, UM VELCRO PARA AJUSTAR À MEDIDA DE CADA PACIENTE E UM VELCRO ESPECIAL PARA FIXAR O CATETER NA POSIÇÃO PRETENDIDA.

A CINTA TEM 70CM ADAPTANDO-SE A QUALQUER PACIENTE PERMITINDO ASSIM UMA CORRETA COLOCAÇÃO.

PARA O USO DA CINTA DE FIXAÇÃO, RECOMENDA-SE:

- ASSEGURAR-SE QUE O CATETER ESTÁ NUMA POSIÇÃO CÓMODA PARA O PACIENTE DEPOIS DE INTRODUZIDO E FIXADO À BOLSA COLETORA.
- COLOCAR A BOLSA NUMA POSIÇÃO A UM NÍVEL INFERIOR DA BEXIGA PARA ASSEGURAR O FLUXO POR GRAVIDADE.
- ASSEGURAR QUE O CATETER NÃO SE DOBRA OU ENROLA SOBRE SI MESMO OU A OUTRO ELEMENTO.
- ESVAZIAR A BOLSA COLETORA PERIODICAMENTE.
- SE FOREM OBSERVADAS OBSTRUÇÕES NA SONDA DEVE-SE SUBSTITUIR OU IRRIGAR PARA ASSEGURAR O FLUXO.
- DURANTE O DIA PODEM SER USADAS BOLSAS FIXAS AO MÚSCULO PARA FAVORECER A MOBILIDADE.
- RECOMENDA-SE O USO DE BOLSAS DE MAIOR CAPACIDADE PARA O PERÍODO NOTURNO.

ESTE PRODUTO TEM COMO FINALIDADE FIXAR O CATETER DA BOLSA COLETORA À PERNA DO PACIENTE, CONSEGUINDO DESTA FORMA QUE NÃO SE MOVA, ENROLE OU OBSTRUA, MINIMIZANDO O RISCO DE FUGAS.

COM O MOVIMENTO VOLUNTÁRIO OU INVOLUNTÁRIO DO PACIENTE O SISTEMA COLETOR PODE SOFRER ALGUM DESAJUSTE, OU PODE NÃO ESTAR CONVENIENTEMENTE COLOCADO, PODENDO GERAR TENSÃO SOBRE O CATETER CAUSANDO FUGAS E INCÓMODO PARA O PACIENTE.

O PRODUTO NÃO INCLUI SONDA, CATETER, BOLSA COLETORA OU OUTRO ELEMENTO PARA ALÉM DA CINTA.



REF: SU-216
50UNI./CX



FORNECEDOR:

2miil
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59