



FAIXA PARA FIXAÇÃO DE POSTURA

FI-400, FI-400P, FI-410, FI-410P

Cuidar com Excelência



FAIXA PARA FIXAÇÃO DE POSTURA

FI-400, FI-400P, FI-410, FI-410P

FAIXA PARA FIXAÇÃO DE POSTURA:

COM A FAIXA FIXADORA DE POSTURA O PACIENTE NÃO TEM QUE SUPORTAR O PESO DO BRAÇO COM O SEU PESCOÇO.

NAS LESÕES DOS BRAÇOS OU MÃOS RECOMENDA-SE A SUA FIXAÇÃO AO CORPO PARA EVITAR QUE OS MESMOS SEJAM INVOLUNTARIAMENTE MAGOADOS. O PRODUTO 410 / 410P (PEDIÁTRICO) É UMA FAIXA ALMOFADADA UNIDA A UMA CINTA COMPOSTA POR MATERIAIS DISTINTOS SOLDADOS ENTRE SI POR ULTRASSONS, SENDO POSSÍVEL A SUA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO.

- INTRODUIZIR O ANTEBRAÇO A PARTIR DO FINAL DA FAIXA. COLOCAR A MÃO À ALTURA PRETENDIDA.
- CRUZAR A FAIXA NAS COSTAS.
- PEGAR NO ANTEBRAÇO E FIXAR O VELCRO NO PONTO CORRESPONDENTE.

REF: FI-410 - UNI./CX: 55 - CDM: 57327351

REF: FI-410P (PEDIÁTRICO) - UNI./CX: 40 - CDM: 43785824

COM A FAIXA FIXADORA DE POSTURA O PACIENTE NÃO TEM QUE SUPORTAR O PESO DO BRAÇO COM O SEU PESCOÇO

A FAIXA É FABRICADA COM DIFERENTES MATERIAIS SOLDADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE UM PROCESSO ULTRASSÔNICO.

VERSÃO PEDIÁTRICO – PARA UTILIZADORES COM PESO INFERIOR A 30KG.

- COM A FACE COLORIDA DA FAIXA VOLTADA PARA SI, COLOCAR A MESMA À VOLTA DO BRAÇO.
- AMARRAR O ANTEBRAÇO COM O CINTO.
- ENVOLVER AS COSTAS EM FORMA DE CRUZ E PRENDER COM O VELCRO.

REF: FI-400 - UNI./CX: 40 - CDM: 23549459

REF: FI-400P (PEDIÁTRICO) - UNI./CX: 40 - CDM: 56141238

NPDM: V0804



FORNECEDOR:

2miil
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59

