



PMH-03P-02F REV.01



IMOBILIZADOR DE BRAÇO E OMBRO EM ALGODÃO E POLIESTER

FI-520S, FI-520M, FI-520L, FI-520XL

FL-067 REV.00 | Data: 08/09/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



IMOBILIZADOR DE BRAÇO E OMBRO EM ALGODÃO E POLIESTER

FI-520S, FI-520M, FI-520L, FI-520XL

A CINTA ABDOMINAL AJUSTA-SE COM UM VELCRO DUPLA FACE O QUE PERMITE USAR EM AMBOS OS BRAÇOS SEM TORCER A FITA.

CINTA ABDOMINAL AJUSTA-SE COM UM VELCRO DUPLA FACE O QUE PERMITE USAR EM AMBOS OS BRAÇOS SEM TORCER A FITA.

BOLSA - 65% ALGODÃO / 35% POLIESTER

SEQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO:

1. EMBOLSAR O BRAÇO.
2. CRUZAR A FITA DA PARTE DE TRÁS POR CIMA DO OMBRO, E PASSAR A MESMA PELA ANILHA E AJUSTAR.
3. CRUZAR A FITA NA PARTE DE TRÁS HORIZONTALMENTE, PASSAR A FITA PELO ANEL E AJUSTAR.
4. DETALHE DA BOLSA.

REF: FI-520S - MEDIDAS(CM): 35X20CM - UNI./CX: 50 - CDM: 41275560

REF: FI-520M - MEDIDAS(CM): 40X20 - UNI./CX: 50 - CDM: 31941303

REF: FI-520L - MEDIDAS(CM): 47X20 - UNI./CX: 40 - CDM: 26319209

REF: FI-520XL - MEDIDAS(CM): 52X20 - UNI./CX: 40 - CDM: 60321156

NPDM: V0804



FORNECEDOR:

2miil
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59